

## Genuvit 300

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

10-2006

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

## Produktbeschreibung

Mit der Genuvit 300 von Orpedo wird das Knie in anatomischer Grundstellung gelagert. Die Länge der Genuvit 300 Orthese von ca. 55 cm, die anatomisch sehr gut vorgeformten Schienen und die dicht am Knie sitzenden Klettverschlüsse ermöglichen eine optimale Lagerung des Kniegelenks. Die Stabilisierungsstäbe lassen sich herausnehmen und den individuellen Gegebenheiten entsprechend einstellen. Das hautfreundliche Froteeematerial ist bei 30°C waschbar und erlaubt ein besonderes hygienisches und angenehmes Tragen. Unsere Knie Ruhigstellungsschiene ist für die Behandlung von Band- und Kniescheibenverletzungen, sowohl vor der Operation zur Abschwellung und Schmerzlinderung, als auch nach Operationen zur Ruhigstellung geeignet.

## Indikation

- Insuffizienz des Kapsel-/ Bänderapparates nach Trauma
- Immobilisierung des Kniegelenks nach Trauma / zur Ruhigstellung vor Operationen
- Zur postoperativen Versorgung von Frakturen
- Zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung
- Distorsion Luxation im Kniegelenk
- Traumatischen Verletzungen, (Läsionen), Bursitis

## Gebrauchsanweisung

Um die Knieorthese Genuvit 300 gut anziehen zu können, ist es empfehlenswert, sich schräg auf die Stuhlkante zu setzen, so dass das betroffene Bein ausgestreckt und frei ist. Die Orthese wird von hinten über das Bein gezogen. Um einen korrekten Sitz der Orthese zu gewährleisten, wird zuerst die Klette über der Wade unter dem Knie geschlossen.

Anschließend werden die anderen Klettverschlüsse verschlossen.

Die Kniescheibe sollte in der Öffnung der Orthese gelagert sein.

*Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.*

## Hinweis

Das stramme Schließen der Orthese ist für die gute Lagerung wichtig. Es dürfen jedoch keine Taubheitsgefühle entstehen. Wenn der betroffene Fuß kalt wird bzw. Taubheitsgefühle entstehen, kann es am zu engen Anlegen oder am nicht korrekten Schienenverlauf liegen.

In diesen Fällen ist der Sitz durch einen Fachmann zu überprüfen und die Schienen eventuell nachrichten zu lassen. Um den korrekten Sitz der Genuvit 300 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren.

## Pflegeanleitung (☑ ☒ ☓ ☔ ☕)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

## Farbe

außen: dunkelblau

innen: hellgrau