

## Humerovit 350

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

O35-0606

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

# GEBRAUCHSINFORMATIONEN

## Produktbeschreibung

Schulterarmbandage zur Ruhigstellung des Schultergelenks bzw. Schulterergelenks.

Die Armlagerung ist individuell einstellbar. Bei Verletzungen im kranialen Humerusbereich bzw. im Acromioclaviculargelenk, bewirkt der horizontal, zirkulär gespannte Lagerungsgurt, eine optimale Lagerung des Humeruskopfes. Dadurch wird eine hervorragende Ruhigstellung des gesamten Schultergelenks erreicht. Die optimale Lagerung des gesamten Arms bietet ein breites Einsatzgebiet für die nachfolgenden Indikationen. Je nach Indikation sollte der zirkuläre Lagerungsgurt auf entsprechender Höhe um den Humerus laufen.

## Indikation

- Verletzung der Rotatorenmanschette, Insuffizienz des Kapsel-/Bänderapparates nach Trauma
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenks nach Trauma
- Zur postoperativen Versorgung von Radius und/oder Ulna Frakturen
- supcapitale Humeruskopffraktur, Humerusfrakturen
- zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung
- Distorsion Luxation
- traumatischen Verletzungen, (Läsionen)
- Bursitis olecrani

## Gebrauchsanweisung

Zur Erleichterung des Anlegens der Bandage ist diese so gearbeitet, dass die klebbare Seite (Blau) die sichtbare Seite bleibt. Die Bandage hat zwei eingearbeitete Kappen für den Ellbogen und die Schulter.

*Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.*

## Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren.

Um den korrekten Sitz der Humerovit 350 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

## Pflegeanleitung (☞ ☒ ☓ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

## Farbe

außen: dunkelblau  
innen: hellgrau